

Desinfectante con detergente **MEDICLEAN PLUS** para uso hospitalario

MEDICLEAN *plus*



Presentación:

100 comprimidos en potes de polietileno blanco.

Recomendaciones de uso:

Es un producto desarrollado para uso en Hospitales, laboratorios, centros odontológicos, salas de emergencias, centros de diálisis y transfusiones y otras instituciones médicas en general.

Aplicaciones:

Los comprimidos Mediclean Plus fueron desarrollados para el uso en la desinfección de superficies con riesgo de infección, de manera rápida, precisa y segura; permitiendo limpiar y desinfectar en un solo balde.

Validez:

3 años

Ventajas de esta presentación:

- ◆ Tabletas fácilmente dosificables, estables, con concentraciones exactas y seguras.
- ◆ Actúa bajo procedimiento de desinfección, validando ppm de cloro (mg/litro)
- ◆ No es necesario realizar dos pasos, ya que limpieza y desinfección se alcanzan en simultáneo.

Modo de uso de **MEDICLEAN Plus**

(ej.: Áreas con alto riesgo de infección)

1



AGREGAR 3 COMPRIMIDOS POR LITRO DE AGUA.

2



ESPERAR 5 MINUTOS.

3



UTILIZAR LA SOLUCIÓN CON UN TRAPO LIMPIO SOBRE LAS SUPERFICIES A DESINFECTAR.